

Preparat **GreenOr**[®] jest środkiem profesjonalnym stosowanym również przez lekarzy w gabinetach stomatologicznych.

WSKAZANIA:



GreenOr polecany jest w leczeniu nadwrażliwości zębów, w szczególności:

- wrażliwości szyjek zębowych spowodowanych przez :
 - a) abrazję (starcie powierzchniowe) lub erozję szkliwa z odstąpieniem zębiny
 - b) recesję dziąseł obejmującą połączenie szkliwno-zębinowe
- w ubytkach przed założeniem wypełnień tymczasowych
- przed tymczasowym osadzeniem prac protetycznych (np. korony, mosty, inne)
- przed założeniem wypełnienia z amalgamatu
- na wrażliwe obszary zębów, zarówno przed, jaki po scalingu (usuwanie płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego za pomocą stomatologicznego scalera ultradźwiękowego)
- w leczeniu periodontologicznym (przyzębia)
- po wybielaniu zębów
- u pacjentów cierpiących na bruxizm (potocznie: zgrzytanie zębami)
 - patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujące przeważnie w nocy, zaliczane do parasomnii.

DZIAŁANIE PREPARATU:

GreenOr dzięki swojej innowacyjnej formule generuje potrójne działanie:

1. Po kilkukrotnym zastosowaniu, za pomocą mikrokryształów (fluorek strontu) preparat **GreenOr** zamyka odstąpięte kanaliki w zębinie, odcinając w konsekwencji przenikanie substancji chemicznych oraz bodźców zewnętrznych drażniących do tej pory odstąpięte końcówki nerwowe.
2. Łagodzi wrażliwość zakończeń nerwowych poprzez działanie jonów potasu (fluorek potasu).
3. Działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie dzięki wysokiej koncentracji chlorku benzalkoniowego, redukując rozwój bakterii i szkodliwy wpływ ich toksyn na zęby.

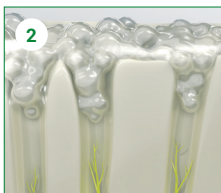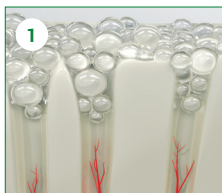

Substancje aktywne **GreenOr** dostają się wraz z preparatem na powierzchnię zęba i mineralizują do postaci mikrokryształów zamykając w konsekwencji dostęp bodźców zewnętrznych drażniących do tej pory odstąpięte końcówki nerwowe.

GreenOr zatyka odstąpięte kanaliki w zębinie oraz dzięki działaniu jonów potasu zmniejsza wrażliwość zakończeń nerwowych znacznie redukując ogólną nadwrażliwość.

Nowa powłoka wytworzona na powierzchni przez **GreenOr** chroni zęby przed dostępem czynników zewnętrznych, łagodzi wrażliwość zakończeń nerwowych i dzięki wysokiej koncentracji chlorku benzalkoniowego działa przeciwbakteryjnie dbając zarówno o komfort pacjenta jak i higienę.

INSTRUKCJA I OPIS DZIAŁANIA **GreenOr**[®]:



1. Umyj zęby zwykłą pastą i szczoteczką po czym wypłucz usta wodą.




2. Następnie za pomocą ligniny, wacika lub gazy osusz powierzchnię wrażliwego zęba lub zębów.



3. Zaaplikuj krople lub dwie na mikro gąbkę, którą masz w zestawie.



4. Nakładaj preparat na miejsce wrażliwe, delikatnie wcierając przez 10-15 sekund.

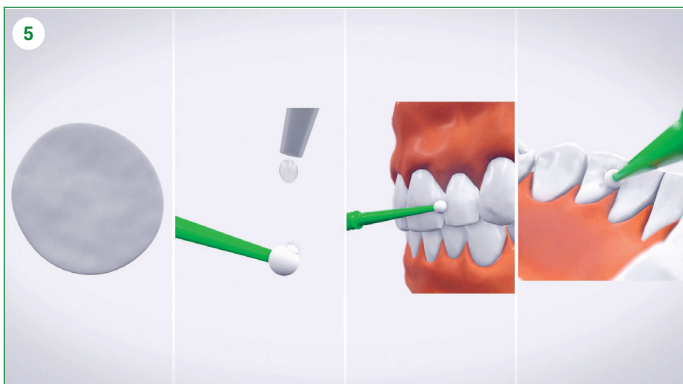

5. W przypadku bardzo silnej nadwrażliwości powtórz proces nakładania ponownie, zgodnie z punktami nr 3 i 4 niniejszej instrukcji, uważając, żeby ślina nie dostała się na leczoną powierzchnię, jeśli jednak do tego dojdzie osusz zęby przed rozpoczęciem ponownego nakładania (zgodnie z opisem w pkt. 2).

Po zastosowaniu preparatu **GreenOr[®], powinno nastąpić natychmiastowe zmniejszenie odczuwanej nadwrażliwości.**

SKŁAD:

Chlorek strontu, fluorek potasu, chlorek benzalkoniowy, benzoesan sodu, sól sodowa karboksymetylocelulozy, woda dejonizowana.

Producent:

Italmed srl
Viale Mazzini, 15
50132 Firenze – Włochy

Dystrybutor:

Trident Sp. z o.o.
ul. Żytnia 13, 41-206 Sosnowiec
tel: +48 32 411 90 16, e-mail: tridentsa@tridentsa.pl